

rodger

Amigo



Draagbare plaswekker

Amigo

De draagbare plaswekker

Een ontwerp van Rodger

Draagbare plaswekker

De **Amigo** plaswekker biedt het kind een extra steuntje in de rug dat het nodig heeft om droog te worden. De Amigo is klein en licht zodat het gemakkelijk gedragen kan worden. De Amigo plaswekker is verkrijgbaar in twee verschillende varianten.

Behandeling van broekplassen

De **Amigo** plaswekker is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van broekplassen. Het alarmsysteem wordt door middel van een clip bevestigd aan bijvoorbeeld kleding. Bij urineverlies geeft de Amigo een tril- en/of geluidssignaal, zodat het kind weet dat hij/zij begint met plassen en naar het toilet moet gaan.

De twee varianten van de Amigo plaswekker zijn:

- *Amigo Wireless*

De eerste variant van de **Amigo** is draadloos en wordt geleverd met een zender. De **Draadloze Amigo** wordt gebruikt in combinatie met de **Rodger Sensor broekjes**. Dit zorgt voor ultiem comfort. De zender wordt met drukknopjes bevestigd op het broekje. De **Amigo** gaat af wanneer er urine in het sensor broekje komt.

- *Amigo Button*

De tweede variant wordt geleverd met de **Rodger Button Kabel** en is te gebruiken in combinatie met de **Rodger Sensor broekjes**. De button wordt bevestigd op de drukknopjes van het sensor broekje. De **Amigo Button** is gemakkelijk te bedienen en heeft een goede connectiviteit.

Specificaties:

- Gewicht: 144 gram
- Diameter Amigo: 6 cm
- Kabel: 80 cm
- Button: 4x1,5 cm
- Batterijen: 2x AAA
- Ingangsspanning: 2.0 – 2.4V
- Zowel alarm- als trilfunctie

Helpdesk:

E-mail: info@rodger.nl

Telefonisch: +31(0)541-351449 op werkdagen van 09.00 tot 17:00 uur

Contactgegevens:

Rodger BV
Langakker 5c
5371EV Ravenstein
Nederland

Garantie:

De Rodger Amigo heeft een garantie van twee jaar, vanaf de ontvangst van het apparaat door de koper, tegen fabrieksfouten en tegen breuk of defecten bij naar ons oordeel normaal gebruik.

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door nalatigheid of het niet opvolgen van de instructies in de bijgevoegde handleiding.

Deze garantie is alleen geldig als u de oorspronkelijke koper bent en beschikt over de kassabon en het aankoopbewijs. De garantie is niet geldig indien reparaties aan het apparaat zijn uitgevoerd door derden. **Rodger** behoudt zich het recht voor om specificaties en garantie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.





Korte handleiding Amigo Wireless:


Inhoud:




- 2x AAA batterijen
- 1 x CR2032 batterij
- 1 x korte handleiding
- 1 x Rodger Amigo
- 1 x zender
- Kalender + stickervel
- Schroevendraaiertje
- Waarschuwingsboekje

Installatie stappen:

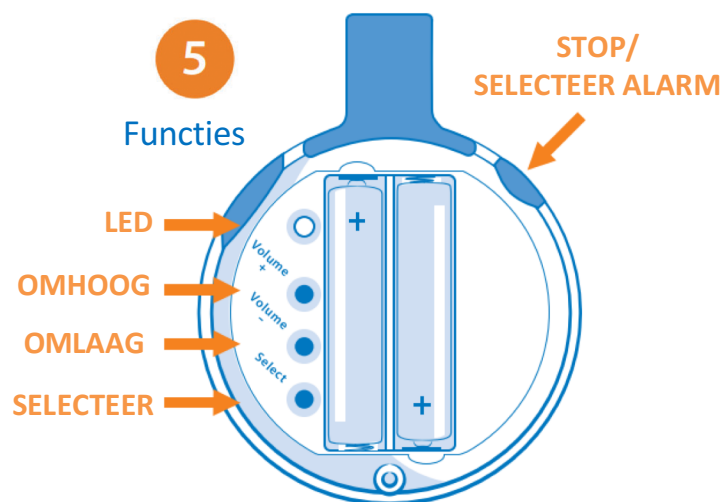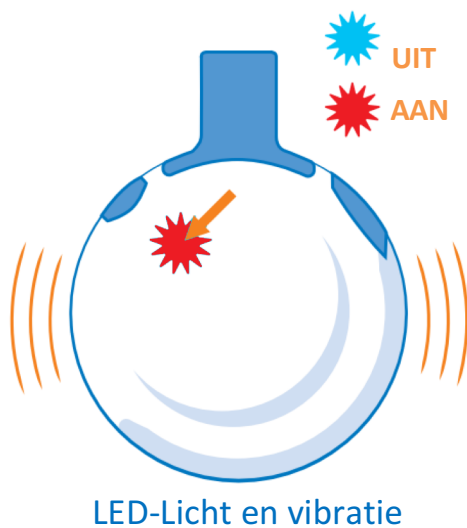
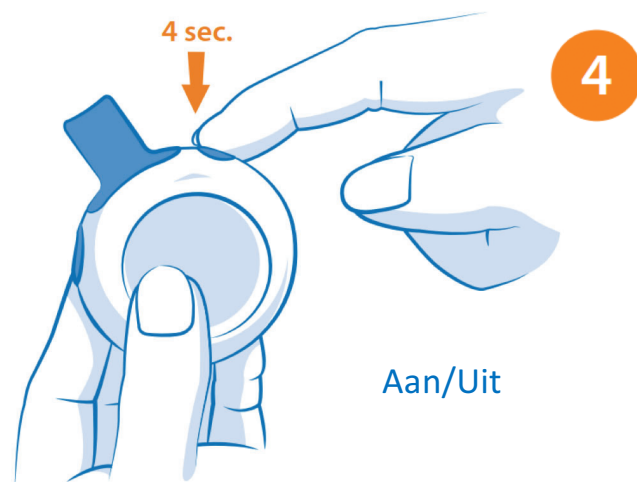
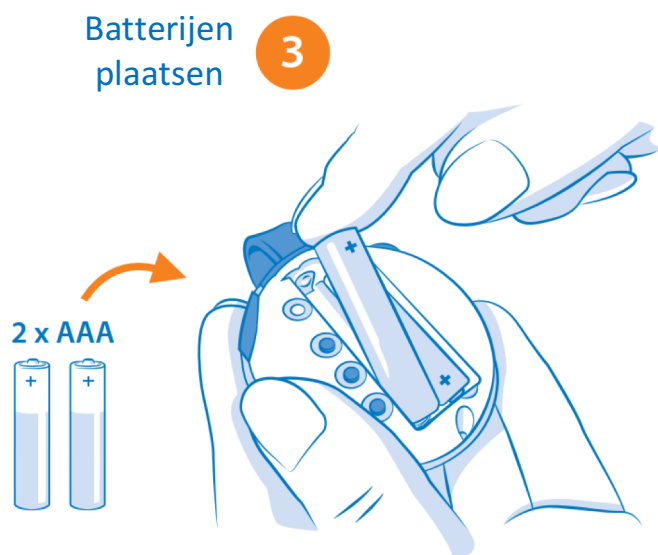


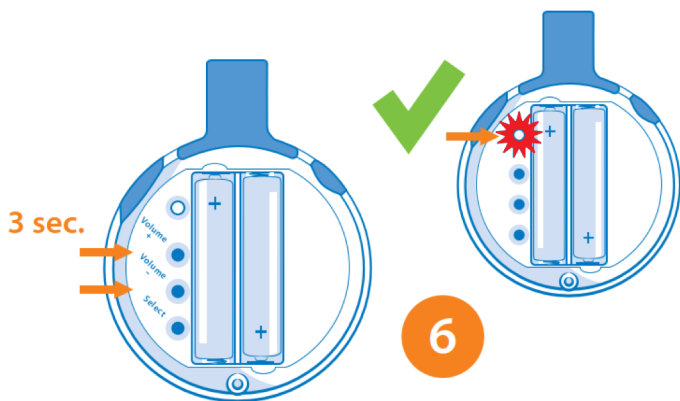

Koppelen:
Druk tegelijkertijd op + en -

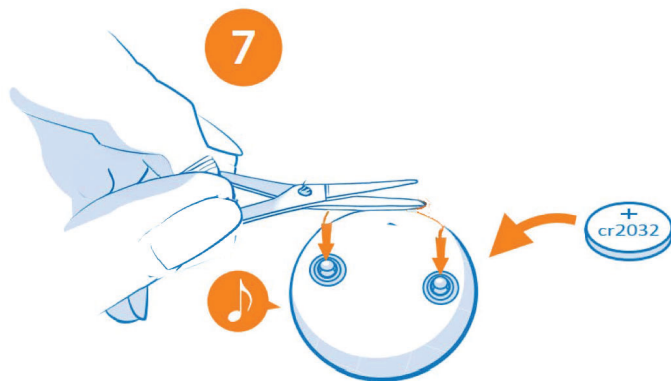

Verbind contacten met metaal
(voorbeeld: schaar)

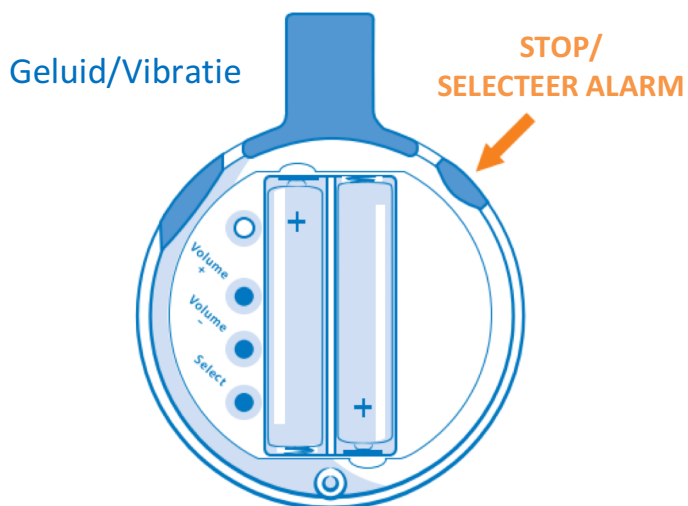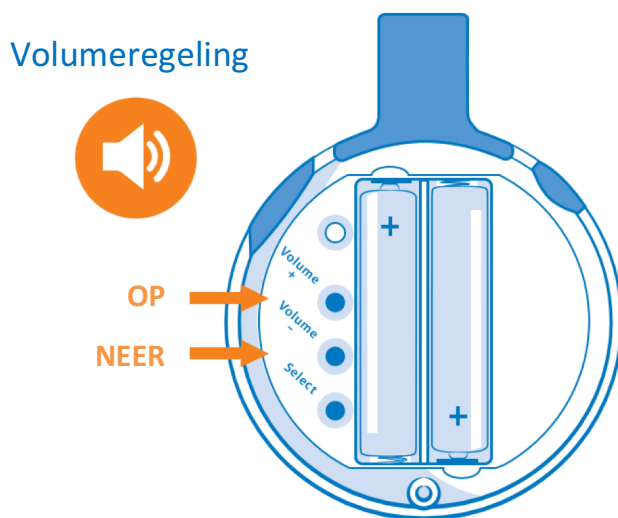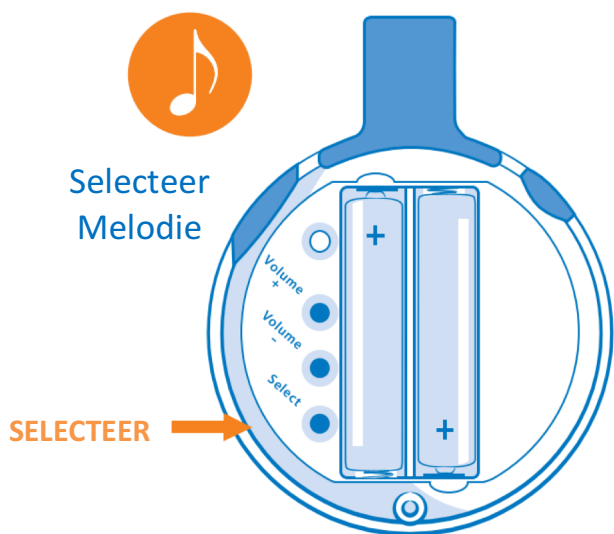

Geproduceerd onder ISO9001.
Ontworpen in Nederland.
Inclusief 2 x AAA-batterij.




Korte handleiding Amigo Button:

Inhoud:



- 2x AAA batterijen
- 1x korte handleiding
- 1x Rodger Amigo
- 1x Rodger Button kabel
- Kalender + stickervel
- Schroevendraaiertje
- Waarschuwing





Snel overzicht:

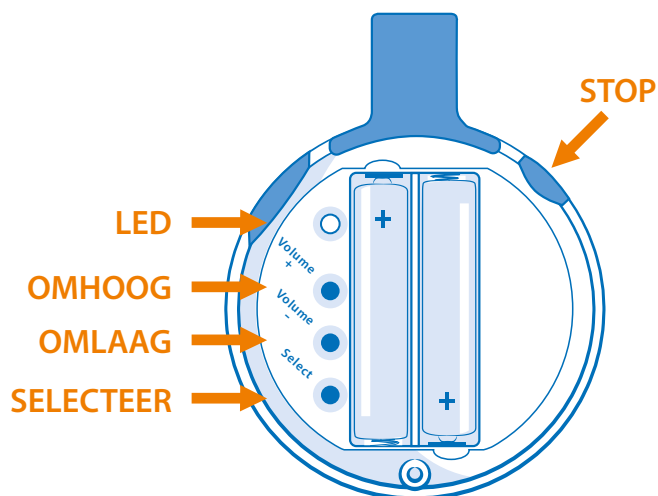

Knoppen en indicatoren.

1. Status-LED
2. volume omhoog knop (OMHOOG)
3. volume omlaag knop (OMLAAG)
4. Select/auto knop (SELECTEER)
5. Stop/vibratie/geluid knop (STOP)


Installatie stappen:

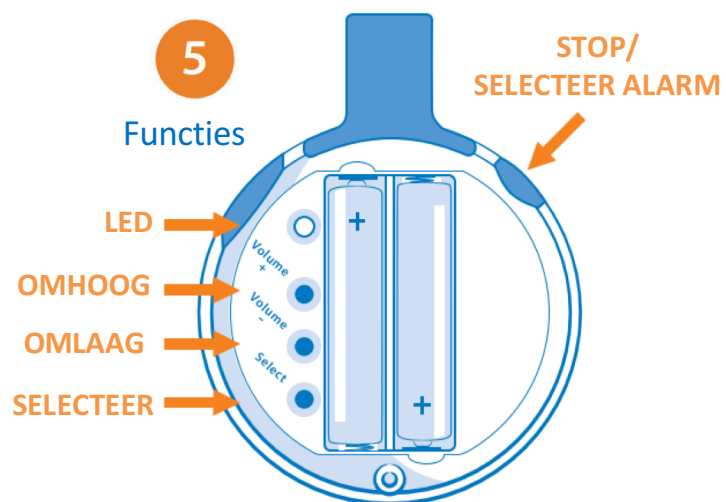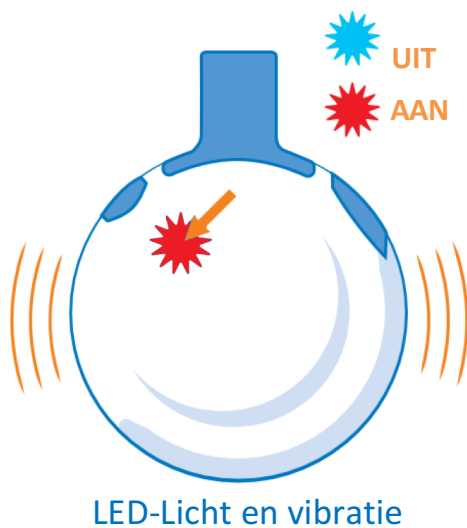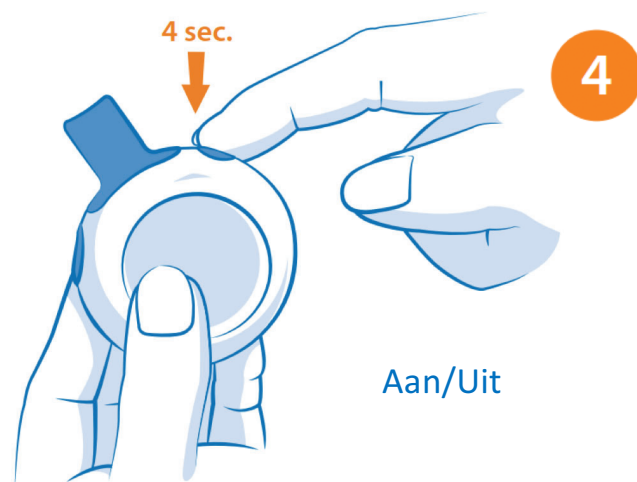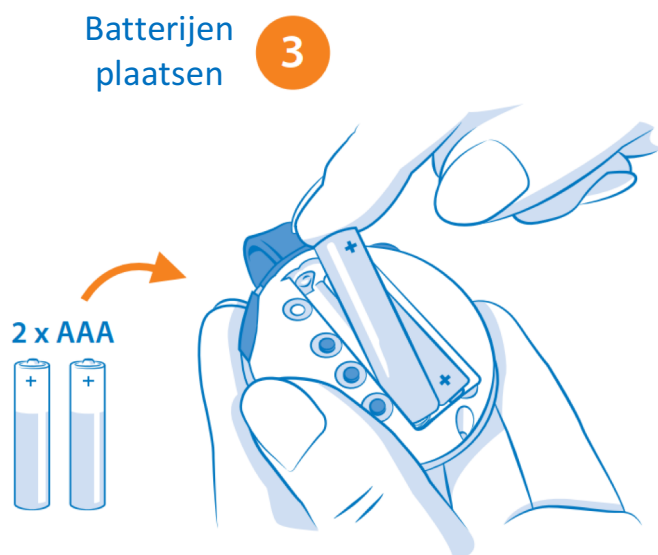

Selecteer
Geluid



SELECTEER

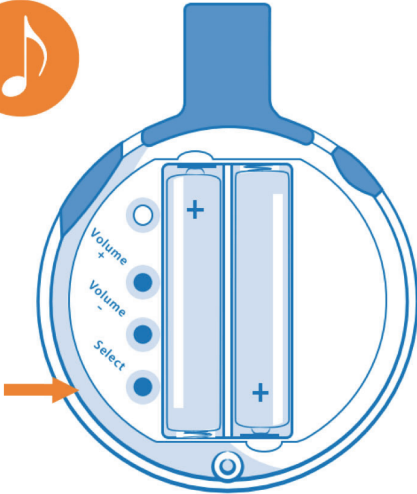


Volume instellingen






UP

DOWN

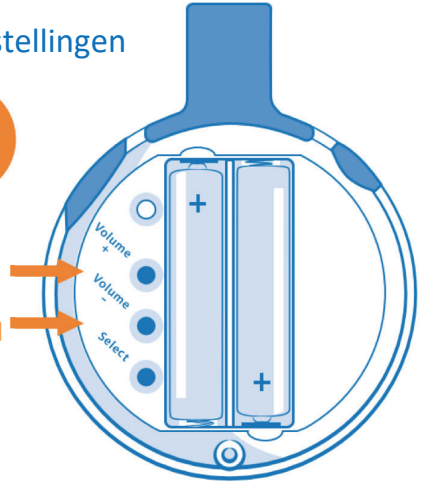

Geluid/Vibratie

STOP/
SELECTEER
ALARM

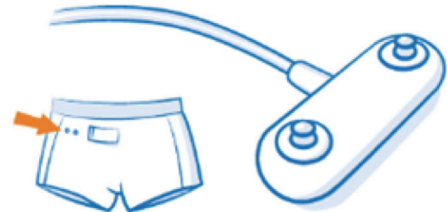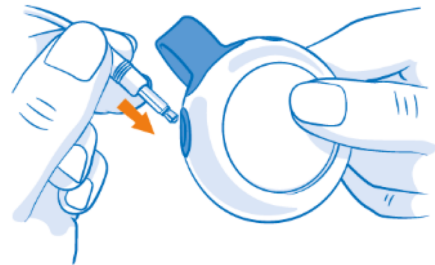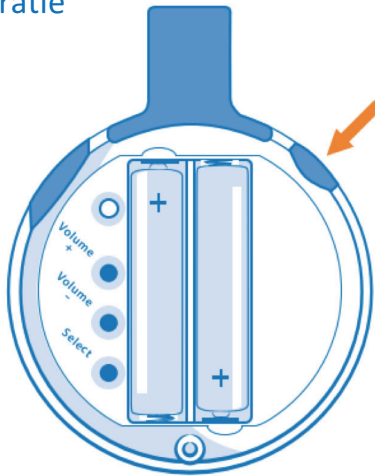

Manufactured under ISO9001.
Engineered in Holland.
2 x AAA-batteries included.

